

Hygieneplan - Ergänzung Instrumentenaufbereitung* im Ultraschallbad

Was Instrument, das aufbereitet werden soll	Wie Art der Aufbereitung	Womit Präparat	Wann Zeitpunkt	Wer Verantwortliche Person
Allgemeines Instrumentarium Mikroinstrumente MIC Instrumente Endoskopzubehör	Gleichzeitige Desinfektion mit Intensiv-Reinigung	STAMMOPUR DR 8 VAH-zertifiziert im Ultraschallbad: 5 min – 2 %	nach der Trockenablage oder unmittelbar nach Benutzung	
	Intensiv-Reinigung	STAMMOPUR R im Ultraschallbad: 3 – 10 min – 2 %		

Verflecktes, verkrustetes und oxidiertes allgemeines Instrumentarium	Grundreinigung	STAMMOPUR GR im Ultraschallbad: 2 – 10 min – 5%, 50 – 60 °C in Kunststoff-Einhängewanne	nach Bedarf	
--	----------------	--	-------------	--

*Der gesamte Prozess ist nach der Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) "Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten" durchzuführen.
Bundesgesundheitsbl 2012 ▪ 55:1244–1310

Alle Präparate mit C €-Kennzeichnung

6829f DE/2015-06