

## STAMMOPUR R

### Limpiador de instrumentos

para ultrasonidos • Concentrado



#### Limpieza y limpieza previa de instrumentos y accesorios sanitarios

Concentrado para la limpieza manual y la limpieza previa en el tratamiento de instrumentos, tanto en baño de ultrasonidos como en proceso de baño por inmersión, de

instrumentos y accesorios sanitarios generales, quirúrgicos, invasivos y no invasivos, y componentes de productos sanitarios,

en AEMP, clínica, consulta médica y pedicura médica.

La compatibilidad de los materiales es muy elevada, adecuada para piezas de metal, titanio, vidrio, porcelana, cerámica y plástico; en caso de duda, se debe comprobar previamente.

Las recomendaciones de idoneidad de las empresas Karl Storz GmbH y Richard Wolf GmbH están disponibles para endoscopios y sus accesorios.

#### **Aplicación en un baño ultrasónico** (Dosificación • Tiempo de acción)

2 % • 3-10 min

#### **Aplicación sin ultrasonidos** (Dosificación • Tiempo de acción)

3-5 % • Máx. 12 h;

*En función del tipo y la dureza de la contaminación*

La aplicación se realiza diluida con agua con una calidad mínima de agua potable y sin aditivos. Asegúrese de que el humedecimiento sea total. Tras el tratamiento, enjuague bien las piezas con agua y séquelas. Cambie inmediatamente la solución de uso en caso de suciedad visible, a más tardar cada día.

En caso de restos de sangre y proteína frescos, aplique en frío (fijación de proteínas); en caso de suciedad persistente, la solución se puede calentar hasta 60 °C.

Tenga en cuenta la información del producto en [www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de).

Solo para uso profesional.

Se puede utilizar como líquido de contacto (2 %) en el procedimiento indirecto para la limpieza a fondo con STAMMOPUR GR en el baño de ultrasonidos.

Ligeramente alcalino (pH 9,5 al 1 % en agua desionizada), biodegradable.

#### **Composición**

5-15 % tensioactivos no iónicos, 5-15 % tensioactivos aniónicos, agentes complejantes, inhibidores, alcohol, aroma.

## Indicaciones de peligro

H318 Provoca lesiones oculares graves.

## Consejos de prudencia

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante  
+P338 varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse  
con facilidad. Proseguir con el lavado.

## Peligro



UFI-Code: XH00-60WF-D006-TC80

Los incidentes graves relacionados con el producto deben comunicarse a DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik y a la autoridad competente.

Basis-UDI-DI: ++G014STR064S

Estas instrucciones de uso son una traducción. La edición vinculante es la versión alemana.

S 3020/07e – 2023/01es



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik  
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)  
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99  
[www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de) • [info@dr-stamm.de](mailto:info@dr-stamm.de)

Fichas de datos de seguridad de la CE e información  
sobre el producto en formato PDF en [www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de)