

STAMMOPUR RD 5

Rengöringsmedel för instrument

för ultraljud • koncentrat • alkaliskt •
för dentallaboratorium och kliniker



Rengöring och förrengöring av arbetsstycken och dentalinstrument

Koncentrat för avlägsnande av föroreningar på arbetsstycken som kronor, implantat och proteser från tillverkning samt medicintekniska produkter och verktyg från bearbetning i dentallaboratorium.

Även för manuell rengöring och förrengöring både i ultraljudsbad och doppbad av

tandläkarinstrument, kirurgiska, invasiva och icke-invasiva dentalinstrument, tillbehör och komponenter för medicintekniska produkter

på tandläkarmottagningar, tandläkarkliniker och inom käkkirurgi och käkortopedi.

Mycket hög materialkompatibilitet, lämplig för delar av rostfritt stål, instrumentstål, titan, glas, porslin, keramik och plast. Testa i förväg om du är osäker.

Ej lämplig för användning på aluminium och alkalikänsliga material såsom t.ex. koppar, mässing, tenn och zink.

Användning i ultraljudsbad (dosering • exponeringstid)

3 % • 3–10 min

Användning utan ultraljud (dosering • exponeringstid)

5 % • max. 60 min;

beroende på föroreningens typ och smutsighetsgrad

När produkten används ska den spädas ut med vatten av minst dricksvattenkvalitet och utan ytterligare tillsatser. Se till att produkten väts fullständigt. Skölj delarna grundligt med vatten efter behandlingen och torka dem. Byt brukslösning omedelbart när föroreningar blir synliga – dock senast dagligen.

När färiska blod- och proteinrester förekommer ska lösningen placeras kallt (proteinfixering); lösningen kan värmas upp till 60 °C om det är svårt att få bort föroreningarna.

Beakta produktinformationen på www.dr-stamm.de.

Endast för yrkesmässig användning.

Alkaliskt (pH 10,9 vid 1 % i avjoniserat vatten), biologiskt nedbrytbart.

Innehåll

5–15 % anjoniska tensider, 5–15 % nonjoniska tensider, 5–15 % fenol, <5 % natriumhydroxid, komplexbildare, alkohol.

Faroangivelser

- H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
+P338 kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Fara



UFI-Code: 8M00-Q0KU-P00P-FPU2

Allvarliga incidenter med produkten ska rapporteras till DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik och den behöriga myndigheten.

Basis-UDI-DI: ++G014STRD507YB

Denna bruksanvisning är en översättning. Den bindande utgåvan är den tyska versionen.
S 3080/07e – 2023/01sv



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

EG-säkerhetsdatablad och produktinformation som kan
laddas ner som PDF-filer på www.dr-stamm.de