

# TICKOMED 1

## Rengöringsmedel för dentala instrument

för ultraljud • koncentrat • mild alkaliskt

**MD** CE

### Rengöring och förrengöring av dentalinstrument och tillbehör

Koncentrat för manuell rengöring och förrengöring vid beredning av instrument, både i ultraljudsbad och doppsbad av

tandläkarinstrument, kirurgiska, invasiva och icke-invasiva medicinska instrument, roterande och icke-roterande små- och precisionsinstrument samt endodontologiska småinstrument, tillbehör och komponenter till medicintekniska produkter

på tandläkarmottagningar, tandläkarkliniker och inom käkkirurgi och käkortopedi.

Mycket hög materialkompatibilitet, lämplig för delar av metall (även aluminium och eloxerade delar), titan, glas, porslin, keramik och plast. Testa i förväg om du är osäker.

#### Användning i ultraljudsbad (dosering • exponeringstid)

3 % • 3 – 10 min

#### Användning utan ultraljud (dosering • exponeringstid)

5 % • max. 12 timmar;

*beroende på föroreningens typ och smutsighetsgrad*

5 % • max. 60 min;

*för aluminium och dess legeringar*

När produkten används ska den spädas ut med vatten av minst dricksvattenkvalitet och utan ytterligare tillsatser. Se till att produkten väts fullständigt. Skölj delarna grundligt med vatten efter behandlingen och torka dem. Byt brukslösning omedelbart när föroreningar blir synliga – dock senast dagligen.

När färska blod- och proteinrester förekommer ska lösningen placeras kallt (proteinfixering); lösningen kan värmas upp till 60 °C om det är svårt att få bort föroreningarna.

Beakta produktinformationen på [www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de).

Endast för yrkesmässig användning.

Kan användas som kontaktvätska (3 %) i indirekt process vid användning av STAMMOPUR Z, STAMMOPUR GR och STAMMOPUR DB i ultraljudsbad.

Milt alkaliskt (pH 9,0 vid 1 % i avjoniserat vatten), biologiskt nedbrytbart.

#### Innehåll

5–15 % nonjoniska tensider, 5–15 % katjoniska tensider, < 5 % fosfat, komplexbildare.

## Faroangivelser

- H315 Irriterar huden.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

## Skyddsangivelser

- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella  
+P338 kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

## Fara



UFI-Code: NS00-Q0YN-900P-SD06

Allvarliga incidenter med produkten ska rapporteras till DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik och den behöriga myndigheten.

Basis-UDI-DI: ++G014TM109WP

Denna bruksanvisning är en översättning. Den bindande utgåvan är den tyska versionen.  
S 3090/07e – 2023/01sv



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik  
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)  
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99  
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

EG-säkerhetsdatablad och produktinformation som kan  
laddas ner som PDF-filer på [www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de)