

STAMMOPUR Z

Medel för borttagning av cement och rengöringsmedel för proteser

för ultraljud • koncentrat



Förrengöring av instrument och tillbehör samt rengöring av tandproteser och ortoser

Koncentrat för borttagning av cement och rengöring av proteser inom ramen för dentalmedicin i ultraljudsbad på

instrument, tillbehör och komponenter till medicintekniska produkter samt nya och burna tandproteser och ortoser

på tandläkarmottagningar, tandläkarkliniker, inom käkkirurgi och käkortopedi samt på dentallaboratorium.

Mycket hög materialkompatibilitet, lämpar sig för delar av rostfritt stål, ädelmetall, titan, glas, porslin, keramik och plast. Testa i förväg om du är osäker.

Lämpar sig inte för syrakänsliga material som lättmetaller och vid skadad förkromning.

Hög rengöringseffekt, som dock först blir effektiv i samband med ultraljudsexponering i ultraljudsbad.

Användning i ultraljudsbad (dosering • exponeringstid)

5 % • 3–10 min

Används endast vid indirekt ljud.

Användning i ultraljudsbad sker uteslutande för indirekt sonikation i insatsskärl, som t.ex. upphängningskar av plast eller glas.

När produkten används ska den spädas ut med vatten av minst dricksvattenkvalitet och utan ytterligare tillsatser.

Använd inte varmt vatten och varm inte upp ytterligare. Se till att produkten väts fullständigt. Efter beredningen ska delarna noggrant sköljas med vatten (enl. den regionala rekommendationen) och torka. Spola med avjoniserat vatten för att säkerställa att det inte finns några fläckar. Vid synliga föroreningar ska brukslösningen bytas ut omedelbart – i annat fall minst varje arbetsdag.

Därefter genomförs vidarebehandling enligt den regionala rekommendationen (rengöring, desinfektion, slutlig desinfektion eller sterilisering beroende på instrumentklassificering).

Proteser ska därefter vidarebehandlas enligt lokala hygienföreskrifter innan de används på patienten.

Vid rengöring av burna proteser/ortoser ska färsk lösning användas för varje protes/ortos som ska rengöras för att förhindra korskontaminering.

Beakta produktinformationen på www.dr-stamm.de.

Endast för yrkesmässig användning.

Mycket surt (pH 1,9 vid 1 % i avjoniserat vatten), biologiskt nedbrytbart.

Innehåll

> 30 % fosforsyra, 5–15 % nonjoniska tensider, 5–15 % katjoniska tensider, inhibitor.

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
+P338 kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Fara



UFI-Code: JQ00-7098-0006-41E4

Allvarliga incidenter med produkten ska rapporteras till DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik och den behöriga myndigheten.

Basis-UDI-DI: ++G014STZ0866

Denna bruksanvisning är en översättning. Den bindande utgåvan är den tyska versionen.

S 3050/09e – 2023/01sv



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

EG-säkerhetsdatablad och produktinformation som kan
laddas ner som PDF-filer på www.dr-stamm.de