

STAMMOPUR RD 5

Detergente per strumenti

per ultrasuoni • concentrato • alcalino •
per laboratori odontoiatrici e ambulatori



Pulizia e pulizia preliminare di pezzi da lavorare e strumenti odontoiatrici

Concentrato per la rimozione di impurità da pezzi quali corone, impianti, protesi di produzione nonché dispositivi medici e utensili dalla lavorazione nel laboratorio odontoiatrico.

Anche per la pulizia manuale e la pulizia preliminare, sia in bagno a ultrasuoni che con procedura a immersione, di

strumenti, accessori e componenti di dispositivi medici odontoiatrici, chirurgici, dentistici, invasivi e non invasivi nell'ambulatorio dentistico, nella clinica odontoiatrica, nella chirurgia maxillofacciale e in ortodonzia.

Elevata compatibilità dei materiali, adatto per componenti in acciaio inox, acciaio strumentale, titanio, vetro, porcellana, ceramica e plastica. In caso di dubbio, è necessario testarlo preventivamente.

Non adatto per l'utilizzo su alluminio e materiali sensibili agli alcali, come ad es. rame, ottone, stagno, zinco.

Utilizzo in bagno a ultrasuoni (dosaggio • tempo d'azione)

3% • 3-10 min

Utilizzo senza ultrasuoni (dosaggio • tempo d'azione)

5% • max 60 min;

a seconda del tipo e della persistenza della contaminazione

L'utilizzo avviene con diluizione con acqua di qualità almeno potabile e senza ulteriori additivi. Assicurarsi di avere effettuato un'irrorazione completa. Dopo il trattamento, sciacquare accuratamente i componenti con acqua e asciugarli. In caso di contaminazione visibile, cambiare immediatamente la soluzione usata, al più tardi ogni giorno.

In caso di residui di sangue e proteine freschi, applicare a freddo (fissazione delle proteine); la soluzione può essere riscaldata fino a 60°C in caso di impurità ostinate.

Osservare le informazioni sul prodotto riportate sul sito www.dr-stamm.de.

Solo per uso professionale.

Alcalino (pH 10,9 a 1% in acqua demineralizzata), biodegradabile.

Composizione

5-15% tensioattivi anionici, 5-15% tensioattivi non ionici, 5-15% fenoli, <5% idrossido di sodio, agenti complessanti, alcol.

Indicazioni di pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
P305+P351 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
+P338 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Pericolo



UFI-Code: 8M00-Q0KU-P00P-FPU2

Eventi gravi in relazione al prodotto devono essere segnalati a DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik e alle autorità competenti.

Basis-UDI-DI: ++G014STRD507YB

Le presenti istruzioni per l'uso sono una traduzione. L'edizione rilegata è la versione tedesca.
S 3080/07e – 2023/01it



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Le schede di sicurezza CE e le informazioni sui prodotti possono essere scaricate in formato PDF da www.dr-stamm.de.