

## STAMMOPUR R

### Nettoyant pour instruments

**MD** C€ • pour ultrasons

L'utilisation de détergents spéciaux adaptés à ce procédé permet d'obtenir un résultat de nettoyage optimal dans la cuve à ultrasons. **STAMMOPUR R** permet une élimination en profondeur des impuretés des objets à nettoyer tout en préservant les objets à nettoyer et les composants à ultrasons.

**STAMMOPUR R** est formulé pour le nettoyage et le prénettoyage **d'instruments médicaux** ainsi que **d'accessoires** et de **composants** de dispositifs médicaux dans un bain à ultrasons et offre en outre :

- Recommandations d'aptitude des sociétés Karl Storz GmbH et Richard Wolf GmbH
- Conforme MDR
- Concentré économique, biodégradable



#### En un coup d'œil

- Concentré
- légèrement alcalin
- également recommandé pour le nettoyage préalable
- Pouvoir de dissolution du sang élevé
- Action nettoyante très élevée en cuve à ultrasons
- Élimine également les saletés tenaces et sèches
- Contaminations
- Excellente compatibilité avec les matériaux
- Odeur agréable
- Économique grâce à une faible concentration d'utilisation
- Biodégradable

L'expérience, la qualité, la fiabilité et les connaissances approfondies de **DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik** se reflètent dans la présence à long terme de nos produits sur le marché. Les préparations STAMMOPUR offrent une efficacité élevée pour répondre en toute sécurité à vos exigences de qualité.

#### Conformité

Dispositif médical, classe I, C€ selon MDR

#### Champ d'application.

**STAMMOPUR R** est un concentré destiné au nettoyage manuel et au prénettoyage dans le bain à ultrasons ainsi qu'au procédé de trempage

**d'instruments et d'accessoires médicaux généraux, chirurgicaux, invasifs et non invasifs et de composants de dispositifs médicaux**

en métal, titane, verre, porcelaine, céramique et plastique.

**L'application** s'effectue dans le cadre du processus de retraitement des instruments dans l'Unité Centrale de Stérilisation (Unité de Stérilisation pour les dispositifs médicaux), dans la clinique, le cabinet médical et dans les soins des pieds.

Pour les endoscopes et les accessoires associés, les recommandations d'aptitude applicables sont celles des sociétés Karl Storz GmbH et Richard Wolf GmbH. Les indications des fabricants d'endoscopes et de leurs accessoires doivent être strictement respectées lors du traitement avec **STAMMOPUR R**, en particulier dans la cuve à ultrasons.

**STAMMOPUR R** présente une compatibilité élevée avec les matériaux. En cas de doute, il convient de le tester au préalable.

Les utilisateurs professionnels exclusivement sont des professionnels formés.

## Dosage • Temps d'action

### Application dans un bain à ultrasons

2 % • 3 – 10 min

### Application sans ultrasons

3 – 5 % • 12 h max.

*Selon le type et la ténacité de la salissure*

Le dosage et les temps d'action doivent être respectés.

Le traitement ultérieur est ensuite effectué conformément les recommandations régionales (désinfection, désinfection finale ou stérilisation selon la classification des instruments).

## Application

Avant l'utilisation, l'étiquette (mode d'emploi) et la fiche de données de sécurité doivent être consultées.

L'application s'effectue dans une cuve à ultrasons ou à immersion, diluée avec de l'eau au moins de qualité potable. L'ajout d'additifs dans la solution n'est pas autorisé.

En cas de résidus frais de sang et de protéines, appliquer de l'eau froide (fixation des protéines). En cas d'impuretés tenaces et séchées, la solution peut être chauffée jusqu'à 60 °C.

Veiller à ce que les objets à nettoyer soient entièrement mouillés. Insérer les pièces creuses de façon à ce que l'air puisse s'échapper des cavités.

En cas d'utilisation dans le cadre d'une procédure de trempage, des étapes manuelles telles que le brossage ou l'essuyage peuvent être nécessaires.

Après le traitement, rincer soigneusement les pièces à l'eau (conf. les recommandations régionales) et les sécher. Rincer à l'eau déminéralisée pour éliminer les taches.

Après le prénettoyage avant les processus de traitement en machine, rincer soigneusement les pièces à l'eau.

En cas de salissures visibles, la solution prête à l'emploi doit être immédiatement remplacée, sinon au plus tard tous les jours de travail.

Recommandé comme liquide de contact (2 %) pour le nettoyage en profondeur avec STAMMOPUR GR par procédé à ultrasons indirect.

## Instructions d'utilisation spécifiques

Respecter les consignes du fabricant des dispositifs médicaux relatives au traitement stérile des produits médicaux concernés.

En cas d'utilisation dans la cuve à ultrasons, respecter strictement les consignes du fabricant de l'appareil.

Ne pas traiter les optiques, les fibres optiques et les pièces collées aux ultrasons.

**STAMMOPUR R** est spécialement conçues pour une utilisation dans des appareils à ultrasons, mais conviennent également pour une utilisation en bain à immersion.

La collaboration fructueuse depuis de nombreuses décennies entre DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik et BANDELIN electronic GmbH & Co. KG dans le développement des détergents et désinfectants favorise une grande expertise dans tous les domaines d'application du nettoyage par ultrasons.

## STAMMOPUR – SONOREX

deux marques fortes pour votre  
nettoyage et désinfection  
dans le secteur médical, dentaire, en laboratoire,  
pour la sécurité du travail/l'hygiène et la protection  
respiratoire!

Vidéos d'application sur la page Youtube de BANDELIN electronic sur: <https://www.youtube.com/c/BANDELIN>

## Tailles des contenants/accessoires REF

Quantité	Forme du contenant	N° réf.
1 litre	Bouteille en PE	988
2 litres	Bouteille en PE	934
5 litres	Bidon en PE	989
10 litres	Bidon en PE	6029

Accessoires	Variante	N° réf.
Pompe de dosage	5 litres	268
Gobelet gradué	10 litres	2660
	100 ml	294



Numéros de référence de notre partenaire  
commercial BANDELIN electronic GmbH &  
Co.KG  
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)  
Tel.: +49 30 76880-0 • Fax: +49 30 7734699  
[bandelin.com](http://bandelin.com) • [info@bandelin.com](mailto:info@bandelin.com)

## Composition:

5–15 % d'agents tensioactifs non ioniques,  
5–15 % d'agents tensioactifs anioniques,  
Agent complexant,  
Inhibiteur,  
Alcool,  
Parfum.

## Données physico-chimiques

Aspect: liquide limpide, jaune clair  
Densité: 1,01 g/cm<sup>3</sup>  
Stabilité en température: -15 à 60 °C  
Valeur pH: 9,5 à 1 % dans de l'eau déminéralisée  
Légèrement alcalin • biodégradable

## Transport

Les contenants sont adaptés et homologués pour le transport. **STAMMOPUR R** n'est pas une marchandise dangereuse au sens des prescriptions de transport.

La plage de température pendant le transport est limitée à la plage de stabilité testée de la préparation de -15 °C et +60 °C.

## Stockage

En règle générale: Conserver les préparations à la verticale, fermées, propres, sèches et à des températures de stockage normales. La plage de température comprise entre +5 °C et +40 °C est considérée comme la température de stockage normale.

Le stockage chez l'utilisateur dans la zone d'utilisation s'effectue à température ambiante, entre +12 °C et +35 °C maximum, en fonction de la zone de travail.

## Environnement et élimination

La solution utilisée peut être déversée dans les canalisations après dilution dans quatre fois son volume d'eau. Les agents de surface contenus dans la solution sont biodégradables conformément au Règlement européen relatif aux détergents (CE/648/2004).

Les instructions concrètes relatives à l'élimination relèvent de l'organisation des processus de travail de l'utilisateur. Les réglementations locales doivent être respectées.

Les contenants sont marqués pour le recyclage et ainsi triés, vidés et rincés conformément aux directives locales d'élimination. Les résidus de produit doivent être éliminés de manière appropriée.

## Marquage selon (CE) N° 1272/2008 (CLP)

Le marquage fait uniquement référence au concentré et non à la solution prête à l'emploi.



Danger

UFI-Code: XH00-60WF-D006-TC80

## Mentions de danger

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

## Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P305+P351 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:  
+P338 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.  
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Les incidents graves avec le produit doivent être signalés à **DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik** et aux autorités compétentes.

Basic-UDI-DI: ++G014STR064S

Numéro SRN: DE-MF-000005887

Version: Janvier 2023 (81058fr-7/2023-01)

Cette information sur le produit est une traduction.  
L'édition reliée est la version allemande.

Conformément aux dispositions légales, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Cette information produit ne peut cependant être communiquée qu'à titre indicatif. Nos recommandations d'utilisation et nos conseils reposent sur des essais et une expérience pratique qui ne peuvent pas être appliqués à la grande variété de surfaces et de contaminants. C'est pourquoi nous recommandons vivement de vérifier l'adéquation du produit à un endroit discret..



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik  
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)  
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99  
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Fiches de données de sécurité CE et notices d'utilisation téléchargeables au format PDF sur [www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de)