

STAMMOPUR R

Instrumenten-Reiniger

für Ultraschall • Konzentrat



Reinigung und Vorreinigung von medizinischen Instrumenten und Zubehör

Konzentrat zur manuellen Reinigung und Vorreinigung in der Instrumentenaufbereitung, sowohl im Ultraschallbad als auch im Tauchbadverfahren, von

allgemeinen, chirurgischen, invasiven und nicht-invasiven medizinischen Instrumenten und Zubehör und Komponenten von Medizinprodukten,

in der AEMP, der Klinik, der Arztpraxis und in der medizinischen Fußpflege.

Sehr hohe Materialverträglichkeit, geeignet für Teile aus Metall, Titan, Glas, Porzellan, Keramik und Kunststoff, im Zweifelsfall ist diese vorab zu testen.

Für Endoskope und deren Zubehör liegen die Eignungsempfehlungen der Firmen Karl Storz GmbH und Richard Wolf GmbH vor.

Anwendung im Ultraschallbad (Dosierung • Einwirkzeit)

2 % • 3 – 10 min

Anwendung ohne Ultraschall (Dosierung • Einwirkzeit)

3 – 5 % • max. 12 h;

je nach Art und Hartnäckigkeit der Verunreinigung

Die Anwendung erfolgt verdünnt mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität und ohne weitere Zusätze. Auf vollständige Benetzung achten. Nach der Behandlung Teile gründlich mit Wasser spülen und trocknen. Gebrauchslösung bei sichtbaren Verunreinigungen sofort wechseln, spätestens jedoch täglich. Bei frischen Blut- und Proteinresten kalt ansetzen (Proteinfixierung); Lösung ist bei hartnäckigen Verunreinigungen bis auf 60 °C erwärmbar.

Produktinformation unter www.dr-stamm.de beachten.

Nur für den beruflichen Anwender.

Als Kontaktflüssigkeit (2 %) im indirekten Verfahren bei der Grundreinigung mit STAMMOPUR GR im Ultraschallbad einsetzbar.

Mild alkalisch (pH 9,5 bei 1 % in VE-Wasser), biologisch abbaubar.

Inhaltsstoffe

5–15 % nichtionische Tenside, 5–15 % anionische Tenside, Komplexbildner, Inhibitor, Alkohol, Duftstoff.

Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

+P338 vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Gefahr



UFI-Code: XH00-60WF-D006-TC80

Schwerwiegende Vorkommnisse mit dem Produkt sind DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik und der zuständigen Behörde zu melden.

Basis-UDI-DI: ++G014STR064S

S 3020/07e – 2023/01de



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

EG-Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen
als PDF-Download unter www.dr-stamm.de