

# STAMMOPUR 24

## Pulizia intensiva e disinfezione

per ultrasuoni • concentrato

Certificato VAH • **MD** C€ 0483

Perizia EXAM • N-69946

### Pulizia intensiva e disinfezione chimica di strumenti e accessori medici

Concentrato per la pulizia manuale intensiva, non fissante e per la disinfezione chimica, sia in bagno a ultrasuoni che in immersione di

strumenti e accessori medici generici, chirurgici, invasivi e non invasivi, nonché attrezzature da laboratorio, strumentazione da laboratorio,

in centrale di sterilizzazione, in clinica o in studio medico.

Per i dispositivi medici critici e semicritici sono necessarie ulteriori fasi di trattamento; non utilizzare per la disinfezione finale.

### Indicazioni per l'uso non medico

Segnalato come biocida ai sensi della direttiva sui biocidi (Regolamento (UE) n. 528/2012).

Indicato anche per la preparazione di dispositivi di protezione individuale (DPI), in particolare maschere respiratorie, occhiali protettivi e protezioni facciali, nonché nel laboratorio non medico per attrezzature e strumenti di laboratorio.

Elevata compatibilità con i materiali, idoneo per parti in metallo, metallo leggero, titanio, vetro, porcellana, ceramica, gomma e plastica. In caso di dubbio, è necessario testarlo preventivamente.

#### Utilizzo in un bagno a ultrasuoni (dosaggio • tempo d'azione)

1 % • 15 min o 2 % • 5 min:

*battericida<sup>1</sup>, levurocida<sup>2</sup>, virucida limitato<sup>3</sup> incl. H5N1 e SARS-CoV-2*

#### Utilizzo senza ultrasuoni (dosaggio • tempo d'azione)

1 % • 60 min:

*battericida<sup>1</sup>, levurocida<sup>2</sup>*

2 % • 30 min o 3 % • 15 min:

*battericida<sup>1</sup>, levurocida<sup>2</sup>, virucida limitato<sup>3</sup> incl. H5N1 e SARS-CoV-2*

<sup>1</sup>EN 13727, EN 14561, DGHM, carico elevato; <sup>2</sup>EN 13624, EN 14562, DGHM, carico elevato; <sup>3</sup>EN 14476, carico elevato

L'applicazione avviene diluita con acqua di qualità almeno potabile e senza ulteriori additivi. Assicurarsi di avere effettuato un'irrorazione completa. Dopo il trattamento, sciacquare accuratamente i componenti con acqua e asciugarli. In caso di contaminazione visibile, sostituire immediatamente la soluzione usata, al più tardi dopo 3 giorni.

Evitare temperature >45 °C (fissaggio della proteina). Non compatibile con preparati aldeidi.

Osservare le informazioni sul prodotto riportate sul sito [www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de).

Solo per uso professionale.

Lievemente alcalino (9,4 all'1% in acqua demineralizzata), biodegradabile.

## 100 g contengono:

9,9 g di bis(3-aminopropil)dodecailamina, 8,4 g di didecilmetilpoliossimetilammoniopropionato, <30% butano-1,4-diolo, 5-15% butilglicole, 5-15% tensioattivi non ionici, <5% piperazina, agenti complessanti, regolatori di pH.

## Indicazioni di pericolo

H302	Nocivo se ingerito.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## Consigli di prudenza

P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
P305+P351	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
+P338	Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308+P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

## Pericolo



UFI-Code: E800-POU8-F00Q-TAGT

Gli incidenti gravi che coinvolgono il prodotto devono essere segnalati alla DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik e alle autorità competenti.

Basis-UDI-DI: ++G014ST2403RG

Le presenti istruzioni per l'uso sono una traduzione. L'edizione rilegata è la versione tedesca.

S 3460/13e – 2023/02it



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik  
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)  
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99  
[www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de) • [info@dr-stamm.de](mailto:info@dr-stamm.de)

Le schede di sicurezza CE e le informazioni sui prodotti possono essere scaricate in formato PDF da [www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de).