

TICKOMED 1

Detergente per strumenti dentistici

per ultrasuoni • concentrato • lievemente alcalino

MD C€

Pulizia e pulizia preliminare di strumenti e accessori odontoiatrici

Concentrato per la pulizia manuale e preliminare nel trattamento degli strumenti, sia in bagno a ultrasuoni che con procedura a immersione, di

strumenti medici odontoiatrici, chirurgici, invasivi e non invasivi, piccoli strumenti e strumenti di precisione rotanti e non rotanti e piccoli strumenti e accessori endodontologici nonché componenti di dispositivi medici endodontologici

nell'ambulatorio dentistico, nella clinica odontoiatrica, nella chirurgia maxillofacciale e in ortodonzia.

Elevata compatibilità dei materiali, adatto per componenti in metallo, anche alluminio o componenti anodizzati, titanio, vetro, porcellana, ceramica e plastica. In caso di dubbio, è necessario testarlo preventivamente.

Utilizzo in bagno a ultrasuoni (dosaggio • tempo d'azione)

3% • 3-10 min

Utilizzo senza ultrasuoni (dosaggio • tempo d'azione)

5% • max 12 h;

a seconda del tipo e della persistenza della contaminazione

5% • max 60 min;

per l'alluminio e le sue leghe

L'utilizzo avviene con diluizione con acqua di qualità almeno potabile e senza ulteriori additivi. Assicurarsi di avere effettuato un'irrorazione completa. Dopo il trattamento, sciacquare accuratamente i componenti con acqua e asciugarli. In caso di contaminazione visibile, cambiare immediatamente la soluzione usata, al più tardi ogni giorno.

In caso di residui di sangue e proteine freschi, applicare a freddo (fissazione delle proteine); la soluzione può essere riscaldata fino a 60°C in caso di impurità ostinate.

Osservare le informazioni sul prodotto riportate sul sito www.dr-stamm.de.

Solo per uso professionale.

Utilizzabile come liquido di contatto (3%) nel metodo indiretto per l'utilizzo di STAMMOPUR Z, STAMMOPUR GR e STAMMOPUR DB nel bagno a ultrasuoni.

Lievemente alcalino (pH 9,0 a 1% in acqua demineralizzata), biodegradabile.

Composizione

5-15% tensioattivi non ionici, 5-15% tensioattivi cationici, <5% fosfati, agenti complessanti.

Indicazioni di pericolo

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso

P305+P351 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

+P338 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Pericolo



UFI-Code: NS00-Q0YN-900P-SD06

Eventi gravi in relazione al prodotto devono essere segnalati a DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik e alle autorità competenti.

Basis-UDI-DI: ++G014TM109WP

Le presenti istruzioni per l'uso sono una traduzione. L'edizione rilegata è la versione tedesca.

S 3090/07e – 2023/01it



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Le schede di sicurezza CE e le informazioni sui prodotti
possono essere scaricate in formato PDF
da www.dr-stamm.de.