

## Accessoires pour cuves à ultrasons



Panier à accrocher



Panier d'insertion



Porte-cassette



Natte silicone à noppes

### Usage prévu

Les produits facilitent le nettoyage par ultrasons en tenant et en positionnant les objets à nettoyer. L'utilisation des produits s'effectue en liaison avec des cuves à ultrasons BANDELIN dans le cadre du traitement manuel, ainsi qu'avant ou après le traitement mécanique de produits médicaux.

Les produits sont des dispositifs médicaux de classe I conformément au règlement (UE) 2017/745.



### Cercle d'utilisateurs

Les produits sont utilisés dans le cadre du retraitement professionnel par du personnel qualifié.

Respectez la notice d'utilisation de la préparation et de la cuve à ultrasons.

### Sécurité



#### Risque de brûlures

Pendant ou après le nettoyage et le traitement, les produits peuvent être chauds.

- Leur contact avec la peau peut provoquer des brûlures.
- Portez des gants de protection appropriés

ou veillez à ce que les produits soient suffisamment refroidis avant de les retirer de la cuve à ultrasons.



#### Risque d'infection

Conformément à l'usage prévu, les produits entrent en contact avec des instruments contaminés. Il existe un risque d'infection lors de la manipulation.

- Portez des gants de protection appropriés et, le cas échéant, un équipement de protection individuelle supplémentaire.
- N'utilisez pas de produits endommagés.



#### Risque de blessure

Les produits endommagés peuvent présenter des bords tranchants et entraîner des blessures.

- Vérifiez régulièrement l'absence de dommages.
- N'utilisez pas de produits endommagés.



#### Endommagement du produit

L'utilisation de préparations agressives ou une contrainte mécanique peut réduire la durée de vie des produits.

- Vérifiez régulièrement l'absence de dom-

mages.

- N'utilisez pas de produits endommagés.
- Évitez de surcharger les produits. Respectez la capacité de charge maximale.

Produit	Charge maximale admise
K 08, K 1 C	1 kg
K 3 C, K 3 CL	2 kg
K 5 C, K 6, KAH 14.3	5 kg
K 6 L, K 6 BL, K 10, K 10 B, K 14, K 14 B, K 28, K 28 C, K 40, K 50, K 50 C	10 kg

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.bandelin.com](http://www.bandelin.com).

Instructions de traitement

Les produits doivent être nettoyés avant chaque utilisation et avant leur élimination. Les incidents graves doivent être signalés à BANDELIN electronic GmbH & Co. KG et à l'autorité responsable.

[www.manuals.bandelin.com](http://www.manuals.bandelin.com)

[info@bandelin.com](mailto:info@bandelin.com)

☎ : +49 30 768 80-0

📠 : +49 30 773 46 99