



Zubehör für Ultraschallbäder



Silikon-Noppenmatte

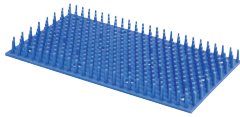

inklusive Befestigungsknöpfe

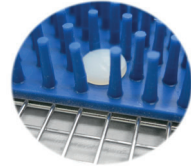

Zweckbestimmung

Die Produkte unterstützen die Ultraschallreinigung durch Aufnahme und Positionierung der zu reinigenden Objekte. Die Verwendung der Produkte erfolgt in Verbindung mit BANDELIN Ultraschallbädern im Rahmen der manuellen sowie vor oder nach der maschinellen Aufbereitung von Medizinprodukten.

Die Silikon-Noppenmatte wird in einen passenden Korb gelegt und mit den Befestigungsknöpfen am Korbgewebe fixiert. Dadurch wird das Aufschwimmen der Silikon-Noppenmatte verhindert.

Die Produkte sind Medizinprodukte der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/ 745.



Anwenderkreis

Die Produkte werden in der gewerblichen Aufbereitung von qualifiziertem Fachpersonal verwendet.

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Präparates sowie des Ultraschallbades.

Sicherheit



Infektionsgefahr

Die Produkte kommen bestimmungsgemäß mit kontaminierten Instrumenten in Kontakt. Beim Umgang besteht Infektionsgefahr.

- Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe und gegebenenfalls weitere persönliche Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Produkte.



Produktbeschädigung

Die Verwendung aggressiver Präparate oder mechanische Überlastung kann die Lebensdauer der Produkte reduzieren.


- Kontrollieren Sie regelmäßig auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Produkte.



Produkt	passend zu
SM 3	K 3 C
SM 5	K 5 C
SM 6	K 6 L
SM 14	K 14, K 14 B
SM 29	K 28, K 29 EM
SM 1000 MC	K 1001 MC

Weitere Informationen finden Sie unter www.bandelin.com.



Aufbereitungshinweise


Vor jedem Gebrauch sowie vor Entsorgung sind die Produkte zu reinigen.
Schwerwiegende Vorkommnisse sind BANDELIN electronic GmbH & Co. KG und der zuständigen Behörde zu melden.





www.manuals.bandelin.com





info@bandelin.com
☎ : +49 30 768 80-0
☎ : +49 30 773 46 99