

Príslušenstvo pre ultrazvukové kúpele



Držiak koša

Účel použitia

Produkty pomáhajú čisteniu ultrazvukom vkladáním a umiestňovaním predmetov, ktoré sa majú čistiť. Produkty sa používajú spolu s ultrazvukovými kúpeľmi BANDELIN v rámci manuálneho spracovania, ako aj pred alebo po strojovej príprave zdravotníckych pomôcok.

Produkty sú zdravotníckymi pomôckami triedy I podľa nariadenia (EÚ) 2017/745.



Okruh používateľov

Produkty používa kvalifikovaný odborný personál pri profesionálnej príprave. Dodržiavajte návod na použitie produktu aj ultrazvukového kúpeľa.

Bezpečnosť



Nebezpečenstvo popálenia

Počas a po čistení a príprave môžu byť produkty horúce.

- Dotyk môže spôsobiť popáleniny.
- Noste vhodné ochranné rukavice alebo dbajte na dostatočné ochladenie produktov pred vyberaním z ultrazvukového kúpeľa.



Nebezpečenstvo infekcie

Produkty prichádzajú v súlade s ich účelom do styku s kontaminovanými nástrojmi. Pri manipulácii hrozí nebezpečenstvo infekcie.

- Noste vhodné ochranné rukavice a v prípade potreby ďalšie osobné ochranné prostriedky.
- Nepoužívajte poškodené produkty.



Nebezpečenstvo poranenia

Poškodené produkty môžu mať ostré hrany a môžu spôsobiť poranenia.

- Pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené.
- Nepoužívajte poškodené produkty.



Poškodenie produktu

Používanie agresívnych prípravkov alebo mechanické preťaženie môže skrátiť životnosť produktu.

- Pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené.
- Nepoužívajte poškodené produkty.
- Vyhnajte sa preplneniu produktov. Dodržiavajte maximálnu záťaž.


Produkt	Maximálna záťaž
KT 30, KT 57, KT 30 Z, KT 57 Z, KT 3000 Z L, KT 3000 Z R	10 kg


Ďalšie informácie nájdete na www.bandelin.com.



Pokyny pre prípravu

Pred každým použitím, ako aj pred likvidáciou, sa musia produkty vyčistiť.

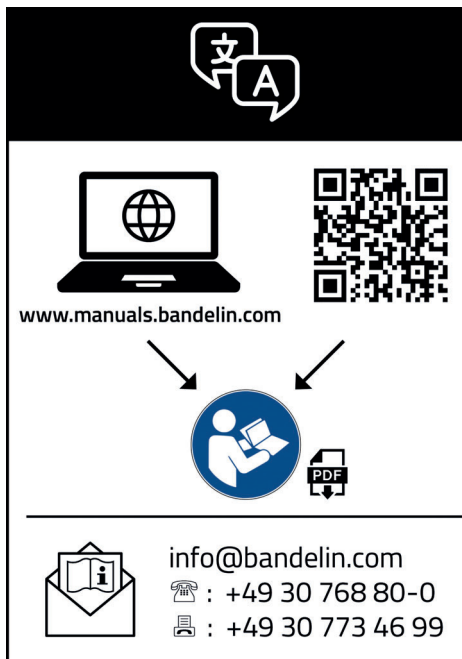

Závažné udalosti sa musia hlásiť spoločnosti BANDELIN electronic GmbH & Co. KG a zodpovednému úradu.








 

www.manuals.bandelin.com

 info@bandelin.com

 : +49 30 768 80-0

 : +49 30 773 46 99