


Akcesoria do myjki ultradźwiękowej



Podstawa kosza

Przeznaczenie

Produkty te wspomagają mycie ultradźwiękowe poprzez pobieranie i pozycjonowanie czyszczonych obiektów. Produkty te są stosowane w połączeniu z myjkami ultradźwiękowymi BANDELIN jako część ręcznego czyszczenia, jak również przed lub po mechanicznym przygotowaniu wyrobów medycznych.

Produkty są wyrobami medycznymi klasy I zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745. 

Grupa użytkowników

Produkty są wykorzystywane w profesjonalnych procesach przygotowywania do ponownego użycia przez wykwalifikowany personel specjalistyczny.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi preparatu oraz myjki ultradźwiękowej.

Bezpieczeństwo



Ryzyko oparzenia

W trakcie lub po czyszczeniu i przygotowaniu produkty mogą być gorące.

- Dotknięcie może spowodować oparzenia.

- Przed wyjęciem z kąpeli ultradźwiękowej należy założyć odpowiednie rękawice ochronne lub zapewnić wystarczające schłodzenie produktów.



Ryzyko zakażenia

Produkty wchodzą w kontakt ze skażonymi instrumentami zgodnie z przeznaczeniem. Podczas obsługi istnieje niebezpieczeństwo zakażenia.

- Należy nosić odpowiednie rękawice ochronne i ewentualnie inny sprzęt ochrony indywidualnej.
- Nie używać uszkodzonych produktów.



Ryzyko obrażeń

Uszkodzone produkty mogą mieć ostre krawędzie i spowodować obrażenia.

- Należy regularnie sprawdzać, czy nie są uszkodzone.
- Nie używać uszkodzonych produktów.



Uszkodzenie produktu

Stosowanie agresywnych preparatów lub przeciążenie mechaniczne może skrócić żywotność produktu.

- Należy regularnie sprawdzać, czy nie są

uszkodzone.

- Nie używać uszkodzonych produktów.
- Unikać przeciążenia produktów. Przestrzegać maksymalnego obciążenia.


Produkt	Maksymalne obciążenie
KT 30, KT 57, KT 30 Z, KT 57 Z, KT 3000 Z L, KT 3000 Z R	10 kg



Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bandelin.com.

Instrukcje przygotowania



Produkty muszą być czyszczone przed każdym użyciem i przed utylizacją.


Poważne incydenty muszą być zgłaszane do firmy BANDELIN electronic GmbH & Co. KG i organu odpowiedzialnego.





www.manuals.bandelin.com





info@bandelin.com
☎ : +49 30 768 80-0
📠 : +49 30 773 46 99