

## Accesorios para baños por ultrasonidos



Cesto colgante



Cesto tamizador



Soporte para casete



Alfombrilla de botones de  
silicona

### Finalidad prevista

Los productos facilitan la limpieza por ultrasonidos mediante la sujeción y el posicionamiento de los objetos que se van a limpiar. El uso de los productos se realiza en combinación con los baños por ultrasonidos BANDELIN para el reprocesamiento manual y antes o después del reprocesamiento automático de productos sanitarios.

Los productos son productos sanitarios de clase I según el Reglamento (UE) 2017/ 745.



### Grupo de usuarios

Los productos se utilizan en el reprocesamiento comercial por parte de personal cualificado.

Observe las instrucciones de uso del preparado y del baño por ultrasonidos.

### Seguridad



#### Peligro de quemaduras

Los productos pueden estar calientes durante o después de la limpieza y el reprocesamiento.

- El contacto puede provocar quemaduras.
- Utilice guantes de protección adecuados o

asegúrese de que los productos se hayan enfriado lo suficiente antes de retirarlos del baño por ultrasonidos.



#### Peligro de infección

Conforme a su uso previsto, los productos entran en contacto con instrumentos contaminados. Existe peligro de infección durante el manejo.

- Utilice guantes de protección adecuados y, en caso necesario, otros equipos de protección individual.
- No utilice productos dañados.



#### Peligro de lesiones

Los productos dañados pueden tener bordes afilados y causar lesiones.

- Compruebe periódicamente que no haya daños.
- No utilice productos dañados.



#### Daños en el producto

El uso de preparados agresivos o la sobrecarga mecánica pueden reducir la vida útil de los productos.

- Compruebe periódicamente que no haya daños.


- No utilice productos dañados.
- Evite la sobrecarga de los productos. Tenga en cuenta la capacidad de carga máxima.



Producto	Capacidad de carga máxima
K 08, K 1 C	1 kg
K 3 C, K 3 CL	2 kg
K 5 C, K 6, KAH 14.3	5 kg
K 6 L, K 6 BL, K 10, K 10 B, K 14, K 14 B, K 28, K 28 C, K 40, K 50, K 50 C	10 kg

Para obtener más información, visite [www.bandelin.com](http://www.bandelin.com).



## Instrucciones de reprocesamiento


Los productos deberán limpiarse antes de cada uso y de su eliminación.  
Los incidentes graves se deben comunicar a BANDELIN electronic GmbH & Co. KG y a las autoridades competentes.





[www.manuals.bandelin.com](http://www.manuals.bandelin.com)





[info@bandelin.com](mailto:info@bandelin.com)  
☎ : +49 30 768 80-0  
📠 : +49 30 773 46 99